

medela 

Finger

Nástavec na injekční stříkačku

Čištění a sterilizace:

Před prvním a následně po každém použití musí být Finger sterilizován. Sterilizace může být provedena ve vodě po dobu 5 min nebo autokláváním (134°C po dobu 3 (nebo 18) minut nebo při teplotě 125°C po dobu 20 minut.

Podmínky skladování:

- teplota: -20°C až 50°C
- relativní vlhkost: 20 – 95 %

Materiál: Silikon

CE Certifikát , 93/42/EEC

medela 

Finger

Nástavec na injekční stříkačku

Čištění a sterilizace:

Před prvním a následně po každém použití musí být Finger sterilizován. Sterilizace může být provedena ve vodě po dobu 5 min nebo autokláváním (134°C po dobu 3 (nebo 18) minut nebo při teplotě 125°C po dobu 20 minut.

Podmínky skladování:

- teplota: -20°C až 50°C
- relativní vlhkost: 20 – 95 %

Materiál: Silikon

CE Certifikát , 93/42/EEC