

Návod na použitie

Vankúš pre tehotné a dojčiacie ženy

Spôsob použitia

Medela vankúš pre tehotné a dojčiacie ženy je navrhnutý pre podporu tela mamičiek v období materstva (obr. 1), odsávania materského mlieka (obr. 2) a pri odpočinku (obr. 3) počas dňa i noci.

Vždy používajte Medela vankúš pre tehotné a dojčiacie ženy s navlečeným poťahom, ktorý chráni obal výplne pred poškodením.

Dôležité bezpečnostné informácie

NEBEZPEČENSTO - Riziko udusenía obalom

Plastové obaly sa môžu stať smrteľnou pascou pri hraní sa s nimi alebo pri lezení dovnútra.

- Uchovávajte obal mimo dosahu detí a zvierat.

VAROVANIE – Riziko udusenía vankúšom

Pri úniku výplňového materiálu (mikroguličky) môže dôjsť k poškodeniu dýchacích ciest. Deti by mohli vdýchnuť alebo prehltnúť vysypané mikroguličky.

- Použite Medela vankúš pre tehotné a dojčiacie ženy iba s navlečeným poťahom vankúša.

- Pred použitím vankúša skontrolujte, či nie je vankúš poškodený a či sa mikroguličky nevysypávajú.

- Vzhľadom k tomu, že mikroguličky nie sú jedlé, uistite sa, že Vaše dieťa žiadne mikroguličky nejde.

Každý vankúš môže pre dieťa predstavovať riziko udusenía (napr. vankúš môže počas spánku sklznúť na tváričku).

- Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru s Medela vankúšom pre tehotné a dojčiacie ženy.

UPOZORNENIE - V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k zmene farby výrobku alebo jeho balenia:

- Je nový alebo má výraznú farbu, alebo časti výrobku sú mokré.
- Bol vystavený priamemu slnečnému svetlu po dlhšiu dobu.

Tieto farebné zmeny nemajú vplyv na použiteľnosť výrobku.

Čistenie a hygiena

Pred praním výplne a poťahu vankúša si prosím prečítajte štítky a postupujte podľa uvedených pokynov.

Pred praním tiež starostlivo skontrolujte obal výplne, či sa nevysypáva alebo či nedošlo k poškodeniu švíkov.

Pokyny na pranie

1. Ak je to možné, perte obal s výplňou a poťah vankúša oddelene vo vrečku na pranie bielizne.
2. Poťah vankúša otočte naruby a perte ho s uzavretým zipsom (nechajte cca 10 cm otvorené).
3. Poťah vankúša perte pri teplote 40 °C a obal s výplňou pri teplote 30 °C.
4. Vysušte obal s výplňou a poťah vankúša. V sušičke prádla sušte len na najjemnejšej úrovni a s dostatočným priestorom pre obal s výplňou vankúša. Vankúš neperte a nesušte s inou farbou prádla.

UPOZORNENIE - Perte a sušte iba v zariadení, ktoré je dostatočne veľké, aby sa mohol vankúš voľne pohybovať. Vysypanie mikroguličiek môže poškodiť Vaše zariadenie.

Odporúčanie: Ak nemáte po ruke dostatočne veľké vrečko na pranie bielizne, môžete použiť tiež poťah vankúša. V tomto prípade je teplota prania obmedzená na 30 °C.

UPOZORNENIE – Výrazné farby nového poťahu vankúša môžu spôsobiť zmenu farby obalu výplne, ak sa perú dohromady.

To však neobmedzuje použiteľnosť výrobku.

UPOZORNENIE - Aby nedošlo k poškodeniu obalu výplne, čo vedie k vysypaniu mikroguličiek, vždy ho perte a sušte vo vnútri vrečka na pranie bielizne, alebo použite ako ochranu poťah vankúša. V prípade nedodržania týchto pokynov, stratíte záruku na produkt.

DEZINFEKČIA

Ak chcete dezinfikovať vankúš, použite iba dezinfekčný sprej.

Obal výplne a poťah vankúša môžu byť ošetrené všetkými konvenčnými dezinfekčnými prostriedkami.

Navlečenie poťahu vankúša

1. Uchopte vankúš 15 až 20 cm „za špic“ na hornom konci obalu výplne (Obr. 4). To spôsobí, že mikroguličky sklznú do spodnej časti obalu.
2. Zatláčajte "špic" na úplný koniec poťahu vankúša (obr. 5).
3. Otočte vankúš a navlečte poťah na vankúš z druhej strany (obr. 6).
4. Po sklznutí výplne smerom dolu uchopte nový "špic" z druhej strany a zatláčajte ho do druhého konca poťahu vankúša (Obr. 7).
5. Rozložte výplň rovnomerne na oboch koncoch vankúša (obr. 8).
6. Zavrite zips poťahu vankúša.

Doplnenie mikroguličiek

Vzhľadom k charakteristike mikroguličiek a na základe typu a dĺžky používania, sa môže objem výplne zmenšiť.

Ak chcete zväčšiť objem výplne, môžete si zakúpiť doplnujúce balenie a postupujte nasledovne:

1. Dajte dole poťah vankúša z obalu výplne.
2. Nájdite otvor pre dopĺňovanie a otvorte ho, aby sa kapsa na doplnenie otvorila.
3. Otvorte zips kapsy na doplnenie.
4. Vložte hadicu doplnovacieho balenia do otvoru a nechajte mikroguličky sklznúť do vankúša.
5. Po dokončení dopĺňovania vyberte doplnovacie balenie z otvoru.
6. Zavrite kapsu na doplnenie.

VAROVANIE - Zdravotné riziko a materiálne škody spôsobené vysypaním mikroguličiek (viď "Dôležité bezpečnostné informácie").

Pred každým použitím starostlivo uzavrite otvor pre dopĺňovanie na obale výplne pre bezpečné používanie Medela vankúša pre tehotné a dojčiacie ženy.

Špecifikácia produktu

Rozmery: 170 x 32 cm (67 x 12,6 ")

Materiál poťahu vankúša: 100% čistá bavlna

Materiál obalu výplne: Netkaný materiál zo 100% polypropylénu

Materiál výplne: EPS (expandovaný polystyrén) mikroguličky

Hmotnosť mikroguličiek: 20 g / l (0,17 lb / US gal)

Veľkosť mikroguličky: priemer 0,2 až 1 mm (0,008 až 0,04 ")

Objem výplne: 29 l (7,7 US gal)

Likvidácia

Podľa miestnych predpisov

