

**Návod na použitie**  
**Jednorazová fľaša**  
**Ready-to-Use****Použitie**

Jednorazová fľaša Ready-to-Use je určená na zber materského mlieka, na bezpečné uskladnenie materského mlieka v chladničke alebo mrazničke, na bezpečnú pasterizáciu materského mlieka a na pomoc pri podávaní materského mlieka, obohateného materského mlieka alebo detskej výživy. Fľaša je určená na použitie v nemocniciach, na klinikách a v mliečnych bankách. Je kompatibilná so všetkými nemocničnými odsávacími setmi Medela. Fľaša nie je určená pre opakované použitie. Pre každé odsávanie použite novú fľašu Ready-to-Use.

**Dôležité bezpečnostné pokyny****Pred použitím si dôkladne preštudujte návod**  
**Pre bezpečnosť a zdravie vášho dieťaťa**  
**VAROVANIE**

I Jednorazová fľaša Ready-to-Use je jednorazový produkt. Nie je určená pre opakované použitie. Opakované použitie môže viesť k strate mechanických, chemických alebo biologických vlastností. Opakované použitie môže spôsobiť krížovú kontamináciu.

I Používajte len originálne príslušenstvo Medela. I Nepoužívajte, ak bol obal pred použitím otvorený alebo poškodený.

I Pred použitím skontrolujte. Pri prvých známkach poškodenia alebo opotrebenia produkt vyhodte. I Nikdy nenechávajte fľaše, viečka a obal bez dozoru.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

**Postup použitia**

I Otvorte obal a vyberte fľašu. K dispozícii sú veľkosti s objemom 80, 150 a 250 ml.

**Nedotýkajte sa vnútornej strany fľaše a viečka.**

**Zber materského mlieka**

I Ak chcete použiť fľašu na zber materského mlieka, naskrutkujte fľašu na konektor vybraného odsávacieho setu Medela. Ďalšie informácie o použití odsávacieho setu a príslušnej odsávačky nájdete v ich návodoch na použitie.

I Po dokončení odsávania označte fľašu štítkom s vaším menom, dátumom a časom odsávania a množstvom odsateho mlieka, napríklad pomocou štítku Medela pre jednorazové fľaše na materské mlieko.

**Skladovanie materského mlieka**

I Ak chcete použiť fľašu na skladovanie materského mlieka v chladničke alebo mrazničke, prečítajte si pokyny pre skladovanie v návode na použitie odsávačky Medela alebo na webe spoločnosti Medela ([www.medela.com](http://www.medela.com)), alebo sa riadte nemocničnými pokynmi.

**Podávanie materského mlieka**

I Ak chcete použiť fľašu na podávanie (obohateného) materského mlieka, ktoré bolo skladované v chladničke alebo mrazničke, prečítajte si pokyny pre rozmrazenie a ohriatie v návode na použitie odsávačky Medela alebo na webe spoločnosti Medela ([www.medela.com](http://www.medela.com)), alebo sa riadte nemocničnými pokynmi.

**Hygiena****Dôležité**

I Fľaša nie je určená pre opakované použitie.

Pre každé odsávanie použite novú fľašu.

I Viečko fľaše nechajte zatvorené až do okamihu použitia. Nedotýkajte sa vnútornej strany fľaše a viečka.

**Pred použitím**

Fľaše sú hygienicky čisté podľa prísnych hygienických štandardov spoločnosti Medela pre prostriedky Ready-to-Use.

Fľaše nie je nutné pred použitím čistiť.

**Materiál:** Fľaša: polypropylén. Viečko: polyetylén s vysokou hustotou.

**Likvidácia:** Dodržiavajte miestne predpisy.

**Značka CE:** Podľa normy 93/42 / EEC



Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6341 Baar, Switzerland  
[www.medela.com](http://www.medela.com)

Autorizovaný distribútor pre SR:  
**DN FORMED Brno s.r.o.**,  
organizačná zložka  
Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč  
Tel.: +421 948 792 576  
email: [medela@medela.sk](mailto:medela@medela.sk)  
[www.medela.sk](http://www.medela.sk)