

# Návod na použitie SpecialNeeds™ Fľaša na kŕmenie

## SLOVENSKY

Pred použitím si dôkladne preštudujte návod.  
TENTO NÁVOD USCHOVAJTE

### Účel použitia

Fľaša s cumlíkom SpecialNeeds je určená na podávanie materského mlieka a iných tekutín s podobnou konzistenciou dojčatám.

### Indikácie pre použitie

Fľaša s cumlíkom SpecialNeeds je indikovaná na použitie pre dojčatá s:  
I vadami ako je nízky svalový tonus,  
I neurologickými, srdcovými alebo respiračnými poruchami, ktoré sú príčinou ťažkej koordinácie pri saní, prehltnutí a dýchaní,  
I chybami ústnej dutiny a tváre, ako je rászštep perý/podnebia,  
I Pierre Robinovým alebo Downovým syndrómom.

### Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pre pacienta/užívateľa/tretiu stranu v Európskej únii a v krajinách s rovnakým regulačným režimom (nariadením 2017/745/EÚ o zdravotníckych pomôckach); ak počas používania tohto prostriedku alebo v dôsledku jeho používania došlo k závažnej nehode, oznámte to prosím výrobcovi a/alebo jeho splnomocnenému zástupcovi a vnútroštátnemu orgánu.

### VAROVANIE na zaistenie bezpečnosti a zdravia vášho dieťaťa!

I Tento produkt je určený na použitie iba pod dohľadom dospelého osoby.  
I Tekutú stravu neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pretože ohrev môže byť nerovnomerný a hrozí obarenie dieťaťa.  
I Tento produkt používajte iba k vyššie uvedenému účelu a v súlade s návodom na použitie.  
I Použitie viac ako jedným dojčatom bez náležitej opätovnej údržby/čistenia môže predstavovať zdravotné riziko a mohlo by spôsobiť krížovú kontamináciu.  
I Používajte iba originálne príslušenstvo Medela.  
I Pred každým použitím skontrolujte. Pri prvých známkach poškodenia, výskytu plesne alebo opotrebovania produkt vyhodte.  
I Nikdy nenechávajte obal a komponenty bez dozoru. Uchovávajte mimo dosahu detí.

### Dôležité bezpečnostné pokyny

I Plastové fľaše a jednotlivé diely môžu byť po zmrazení krehké a môžu sa pri páde z výšky rozbiť.  
I Fľaše a jednotlivé diely sa tiež môžu poškodiť pri nesprávnom zaobchádzaní, napríklad pri náraze, po príliš silnom utiahnutí alebo prevrhnutí.  
I S fľašami aj s jednotlivými dielmi manipulujte opatrne.  
I Tekutú stravu nepoužívajte, ak sú fľaše alebo jednotlivé diely poškodené.

### Čistenie

#### Dôležité

I Na čistenie používajte výhradne pitnú vodu.  
I Pred prvým použitím všetky diely vyčistite (viď nižšie).  
I Po použití všetky diely okamžite vyčistite.  
I Nižšie uvedené pokyny na čistenie majú všeobecnú povahu. Informácie o miestnych predpisoch a smerniciach získate od regionálneho zástupcu spoločnosti Medela alebo na našej webovej stránke ([www.medela.com](http://www.medela.com)).

#### Pred prvým použitím a potom raz denne

I Ponorte všetky diely do vody a nechajte ich 5 minút variť.  
I Nechajte vyschnúť na čistej utierke.

#### Po každom použití

I Rozložte fľašu na jednotlivé diely. Uistite sa, že je žltá základňa ventilu oddelená od cumlíka.  
Od základne ventilu oddelíte aj bielu membránu.

**Poznámka:** Mlieko zostávajúce vo fľaši môžete znovu použiť. Mlieko zostávajúce v cumlíku je však nutné vyhodit. Za týmto účelom podržte fľašu nad drezom, opatrne odskrutkujte uzáver a vyberte ho spolu so cumlíkom a základňou ventilu tak, aby nedošlo k rozliatiu mlieka. Mlieko zostávajúce v cumlíku zlikvidujte.

I Opláchnite všetky diely studenou vodou (pribl. 20 °C). Dôkladne vyčistite všetky diely dostatočným množstvom teplej mydlovej vody (pribl. 30 °C). Použite bežne dostupné umývacie prostriedky, najlepšie bez umelých vôní a farbív. Opláchnite všetky diely studenou vodou (pribl. 20 °C).  
I Produkt je možné umývať aj v umývačkách riadu. Umiestnite diely do horného koša alebo do priehradky na príbory. Použite bežne dostupný čistiaci prostriedok určený pre umývačky riadu.  
I Nechajte vyschnúť na čistej utierke.


### Skladovanie

Umiestnite čisté diely do čistého skladovacieho vrečka alebo do čistého prostredia. Je dôležité, aby všetka zvyšková vlhkosť vyschla. Neskladujte diely vo vzduchotesnej nádobe alebo vrečku.

### Postup pri používaní

I Odporúča sa, aby matka absolvovala svoje prvé kŕmenia pomocou fľaše SpecialNeeds pod dohľadom profesionálnych alebo zaškolených pracovníkov.  
I Pred kŕmením dieťaťa vždy skontrolujte teplotu mlieka / tekutej stravy.

#### Zostavenie fľaše

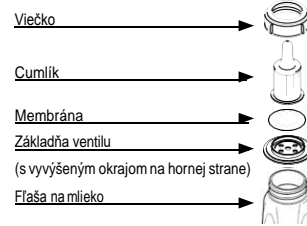


I Uchopte základňu ventilu tak, aby vyvýšený okraj smeroval nahor. Do základne ventilu umiestnite bielu membránu. Zatlačte výstupok membrány na doraz do stredového otvoru základne ventilu.  
I Naplňte fľašu požadovaným množstvom tekutej stravy.  
I Umiestnite zostavený ventil s vysokým okrajom smerujúcim nahor na otvor fľaše.  
I Na základňu ventilu umiestnite cumlík tak, aby sa okraj nachádzal vo vnútri cumlíka.  
I Nasuňte skrutkovací uzáver na cumlík. Zoskrutkujte všetky diely pomocou uzáveru.

#### Plnenie cumlíka



I Držte fľašu vo zvislej polohe. Stlačte cumlík a vytlačte z neho určité množstvo vzduchu.  
I Pokračujte v stláčaní a otáčajte fľašu dnom nahor.  
I Teraz cumlík uvoľnite. Natečie do nej určité množstvo tekutiny.  
I Vyššie uvedené kroky opakujte, pokiaľ nebude cumlík plný.

#### Regulácia prietoku mlieka

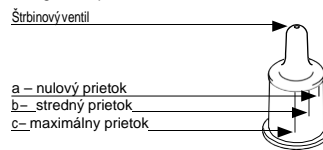

Fľaša SpecialNeeds umožňuje prispôbiť prietok mlieka potrebám vášho dieťaťa. Na nastavenie prietoku tekutiny použite rysky na cumlíku. Najkratšia ryska zodpovedá nulovému prietoku, stredná ryska značí stredný prietok, najdlhšia ryska znamená maximálny prietok. Prietok je možné upraviť nasmerovaním príslušnej rysky na cumlíku na nos dieťaťa (viď obrázok vpravo). Ak potrebuje dieťa pred zahájením kŕmenia privyknuť cumlíku, zvoľte najskôr nulový prietok (najkratšiu rysku).

Ako funguje mechanizmus kontroly prietoku?  
Poloha cumlíka/rysky v ústach dieťaťa ovplyvňuje otvorenie štrbiny ventilu v hornej časti cumlíka:

- a – nulový prietok = štrbina vo vodorovnej polohe, tlak udržiava ventil zatvorený
- b – stredný prietok = štrbina umiestnená uhlopriečne, ventil je čiastočne otvorený a umožňuje mierny prietok
- c – maximálny prietok = štrbina vo zvislej polohe, tlak otvorí ventil a zaisťuje maximálny prietok

**Poznámka:** Štrbina sa medzi saním uzatvára, aby sa dieťa tekutou stravou nezahltilo.  
**Poznámka:** Fľaša umožňuje priebežné zmeny prietoku. Akékoľvek požadované množstvo tekutiny medzi nulovou a maximálnou hodnotou dosiahnete príslušným polohovaním fľaše medzi ryskami.

**Materiál:** Cumlík a membrána: silikón, ostatné: polypropylén.  
**Likvidácia:** Dodržujte miestne predpisy.

- Označuje zhodu s požiadavkami EÚ na zdravotnícke pomôcky
- Označuje, že obal obsahuje produkty, ktoré môžu prichádzať do kontaktu s potravinami podľa nariadenia (ES) 1935/2004
- Označuje materiál, z ktorého je predmet vyrobený
- pcs** Označuje počet produktov obsiahnutých v balení
- Označuje, že predmet je recyklovateľný



Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6340 Baar, Switzerland  
[www.medela.com](http://www.medela.com)

International Sales  
Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6340 Baar, Switzerland  
Phone +41 41 562 51 51  
[www.medela.com](http://www.medela.com)